

Übersicht Blutabnahmematerialien Pädiatrie

Röhrchentyp / Stoppelfarbe	Etiketten- Bezeichnungen	Verwendung / Handhabung
 braun, 7,5 ml bzw. 2,6 ml (Serum mit Gel)	SERUM SERUM All.	Klinische Chemie, Immunologie, Vitamine, gewisse Medikamentenspiegel, ... Bei Verwendung der 2,6 ml Röhrchen sind bei Anforderung zahlreicher Parameter 2 Röhrchen erforderlich! Bei Raumtemperatur ca. 30 Minuten bis zum vollständigen Ablauf der Gerinnung stehen lassen, danach 10 Min. zentrifugieren.
 rot, 1,6 ml (EDTA)	VIO VIO-Fremd VIO-Hausl.	Blutbild, Blutsenkung, HbA1c; für alle 3 Bestimmungen 1 Röhrchen ausreichend Nicht zentrifugieren!
 grün, 1,4 ml (Citrat)	BLAU BLAU-Fr. BLAU-THR	Gerinnung - Bei Einsendung am selben Tag kein Zentrifugieren notwendig - Bei Einsendung am nächsten Tag: zentrifugieren, Überstand abheben und tiefrieren; gefroren weiterleiten UNZENTRIFUGIERT! Für Thrombozyten im Citratblut
 gelb, 1,2 ml (Fluorid)	ROSA ROSA-1 ROSA-2 ROSA-3	Blutzucker aus Fluorid Blutzucker nüchtern (oGTT) Blutzucker nach 1 Stunde (oGTT) Blutzucker nach 2 Stunden (oGTT) Sofort nach Blutabnahme 10x schwenken; nicht zentrifugieren.
 rot, 1,6 ml (EDTA) farblos (Polystyrol)	EDTA-PL HOMO EDTA-gekü.	Osteocalcin, Crosslaps, PTH, ... Homocystein, Histamin EDTA-Röhrchen innerhalb von 30 Minuten zentrifugieren, Überstand abheben, Sekundär-Röhrchen etikettieren und gut kühlen.
 rot, 1,6 ml (EDTA)	VIO-6ML	Blutgruppenbestimmung, Genanalysen, ... Ggf. wegen geringer Füllmenge 2 Röhrchen erforderlich! Nicht zentrifugieren!
 weiß, 2,7ml (ohne Zusatz)	WEISS	gewisse Medikamentenspiegel, Coombstest, ... gewisse Medikamente werden am Trenngel adsorbiert (siehe Vorgaben im Online-Anforderungsprogramm oder im Untersuchungsverzeichnis)
 gelb oder farblos (Polystyrol)	HARN HARN-24 SICHTH	Spontanharn, Sammelharn, ... 24h –Sammelharn: Teilmenge im Polystyrolröhrchen einsenden, Harnmenge, Größe und Gewicht bitte mitangeben Sichtharn: kontrollierte Harnabgabe bei Drogenscreening
 olivgrün (khaki)	OLIV	Harnkultur, Antibiogramm Aufgrund des Stabilisators (Borsäure) für klin.-chem. Untersuchungen nicht geeignet!